



Uživatelský manuál

Sitter





VAROVÁNÍ: VYVARUJTE SE VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ VYPADNUTIM NEBO VYKLOUZNUTIM DÍTĚTE ZE SEDADLA.
 NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI BEZ DOZORU.
 VŽDY MĚJTE DÍTĚ NA DOHLED.
 DŮLEŽITÉ: UCHOVÁVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBY.
 BEZPEČNOST DĚTÍ JE VAŠE ODPOVĚDNOST.
 VŽDY POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁSY.
 ZAJISTĚTE POPRUHY TĚSNĚ.
 VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE JSOU BLOKOVACÍ KOLEČKA ZAMČENÁ, KDYŽ JE ZÁKLADNA USTÁLENÁ.
 PŘEDCHÁZEJTE VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO SMRTI - NEPOUŽÍVEJTE V MOTOROVÝCH VOZIDLECH.

Části

- 1 Sitter s připevněným popruhem
- 1 hrudní pás
- 1 rozkrokový popruh
- 1 popruh kolem pasu
- 1 sekundární připevňovací pásek

Univerzální
upevňovací pásky



5 způsobů, jak používat Sitter

*Zajistěte Sitter v níže uvedených aplikacích pomocí univerzálních připevňovacích popruhů



Na židli



Mobilní základna



Mobilní základna s
kolečky




Měkká základna



V kočárcích

SITTER FIXACE A PŘIPOJENÍ

Schéma zapojení

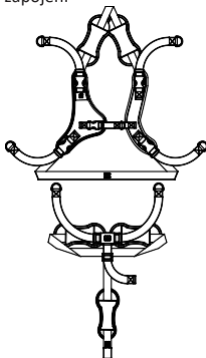

Fixace zapojená



Hrudní popruhy
Pětibodový pás

Tříbodový pánevní postroj
Pásové a rozkrokové popruhy

Upevňovací pásek
Připevnění na židli atd.



INSTALACE PÁNEVNÍHO POSTROJE



Krok 1
Rozkrokový popruh nahoru
přes spodní středový otvor.



Krok 2
Pravý pásový pás nahoru
přes pravý otvor.



Krok 3
Levý pásový popruh nahoru
přes levý otvor.



Krok 4
Spona klipu.

INSTALACE HRUDNÍHO POSTROJE



Krok 1
Odepněte pravý hrudnípás
a protáhněte jej přes levý
ramenní otvor.



Krok 2
Navlékněte pásku kolem
zad a ven z pravého
ramenního otvoru.



Krok 3
Připněte k horní části
pravého ramenního
popruhu.



Krok 4
Odepněte pravý boční po-
pruh a protáhněte popruh
levým otvorem u pasu.



Krok 5
Závitový pásek pod
rozkrokovou smyčkou a
nahoru a ven z pravého



Krok 6
Znovu nasadte hrudní
sponu na spodní část pravé
strany postroje na hrudi.




Krok 1
Navléčte popruh přes levou
stranu.




Krok 2
Popruh pod Sitterem upe-
vněte na horní části smyčky
a nahoru přes pravou

PŘIPEVNĚNÍ POPRUHŮ


Připojení na židli

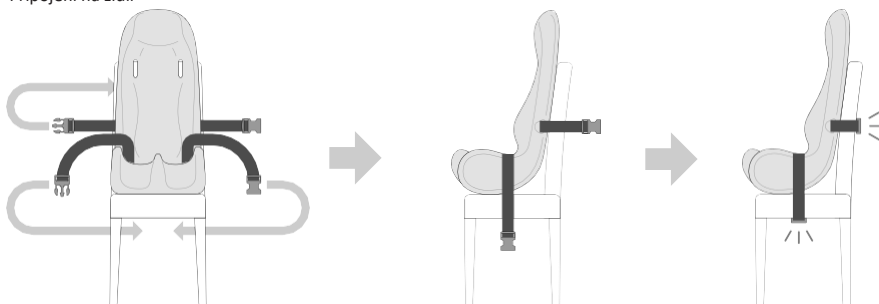


Připevnění na dřevěnou základnu

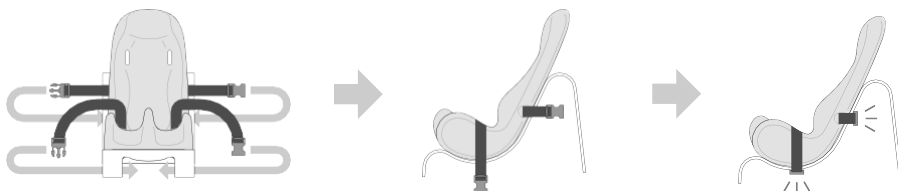

Připevnění k měkké základně

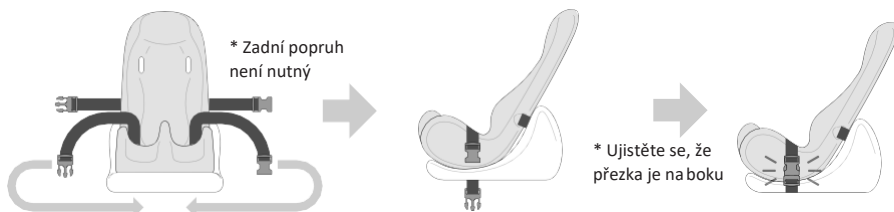

připevnění ke kočárku EIO nebo Jogger

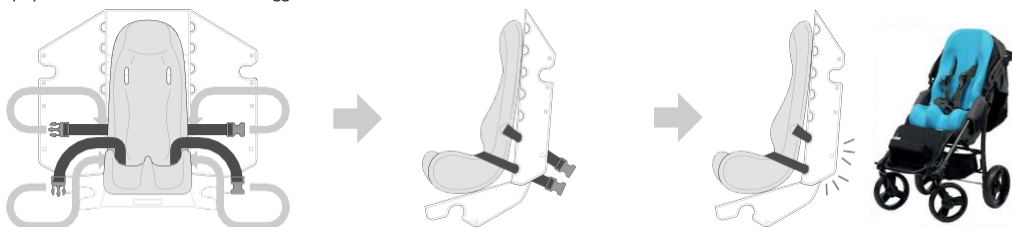

* nainstalováno

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ SITTER Správné seřizovací techniky



Používejte kryty ramen, abyste zabránili odření krku a obličje vašeho dítěte o plastové spony.

Abyste zajistili správné umístění hrudního postroje na vašeho dítě, ujistěte se, že hrudní pás leží uprostřed hrudníku (úroveň prsou).

Pánevní postroj má speciální zámek, který zabraňuje uvolnění pánevního pásu pro udržení správné polohy pánve.

Pánevní pás má jedno tlačítko pro rychlé uvolnění, které odemkne obě strany pánevního postroje pro rychlý a snadný přístup k vašemu dítěti.

Upravte délku rozkrokového popruhu tak, aby pánevní pás mohl ležet přes pánve. to zabrání položení pánevního pásu přes dolní část břicha.



Pánevní pás má speciální zámek, který jej udržuje na požadované délce. Pro nastavení výšky zatlačte na popruh a uvolněte zámek.

POLOHOVÁNÍ POLOHY 25 °

Všechny základny se mohou naklonit až o 25 °



Krok 1
Odepněte připevňovací popruhy.

Krok 2
Nastavte požadovaný úhel.

Krok 3
Upevňovací popruhy pro zajištění

ÚDRŽBA A PÉČE O PRODUKTY

Produkt Sitter je voděodolný a nepropustný, ale nenamáčejte jej. Pravidelně otírejte sedadlo jemným čisticím prostředkem. Chcete-li prodloužit životnost pravidelně odstraňujte nečistoty ze spon a popruhů.

PÉČE O POSTROJE

Umístěte postroj do sítky na praní a perte v pračce studenou vodou a poté usušte na vzduchu.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Kontaktujte přímo svého prodejce - Petr Junek REHABIFLEXX.

- Autorizovaným dodavatelem kočárku JOGGER je společnost:
Petr Junek - REHABIFLEXX, IČ: 76163695
- Telefon: +420 773 033 101.
- E-mail: použijte formulář na www.rehabiflexx.com.
- Zdravotní Kočárek EIO je zdravotnický prostředek třída I nesterilní, pro zdravotně postižené osoby s poruchou mobility.

OZNÁMENÍ

Na produkty od dodavatele používejte pouze příslušenství a díly dodané dodavatelem. Speciální díly nejsou zaměnitelné s produkty jiných výrobců. Opatřebované díly okamžitě vyměňte kvůli bezpečnosti.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Naleznete na webových stránkách: www.rehabiflexx.com.



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**
GLOBAL CAREHAB
Holmstrupgaardvej 11
8220 Brabrand
Denmark

Tel: +45 24 65 55 50
Web: www.globalcarehab.com

Date: **Id:**



Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

*Tento NÁVOD K OBSLUZE byl vydán 1. 6. 2019.
Dodavatel si vyhrazuje právo změn z důvodů
technického vývoje produktu a příslušenství.*



© 2009 Bergeron By Design

Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.